

loophulp lichtgewicht

handleiding

Bedankt om deze loophulp te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. We geven je graag aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.

wat huur je bij Goed?

loophulp lichtgewicht

eventueel zelf aan te kopen
opbergtas

gebruik van de loophulp lichtgewicht

- 1 Klap de loophulp open. Druk met beide handen de steunbuizen van de zitting links en rechts naar beneden.
- 2 Stel de hoogte van de handvatten in.
 - Draai de sterknop aan de zijkant los.
 - Schuif de buis zover naar boven tot de handvatten op de juiste hoogte staan.
 - Sta mooi rechtop met je handen los langs je lichaam tussen de loophulp.
 - Verstel de loophulp zo dat het handvat juist ter hoogte van je pols komt. Zo ontstaat tijdens het gebruik van de loophulp een lichte buiging in je elleboog. Dat is het meest comfortabel.
 - Vergrendel de loophulp op deze hoogte door de sterknop opnieuw aan te draaien.
- 3 Gebruik het zitje om te rusten.
 - Druk de remhendels naar beneden. Zo staat de loophulp op de parkeerrem.
 - Draai je om en ga voorzichtig zitten.
 - Ontgrendel de rollator. Trek de remhendels terug naar boven om te lossen om de parkeerrem terug te lossen.
- 4 Trek beide remhendels naar boven om de loophulp te laten remmen.
- 5 Vouw de loophulp op.
 - 5a: Ontgrendel de inklapbeveiliging door de rode knop naar achteren te trekken.
 - 5b: Til de zitting met de trekklus omhoog.



stap 1




stap 2




stap 3




stap 4

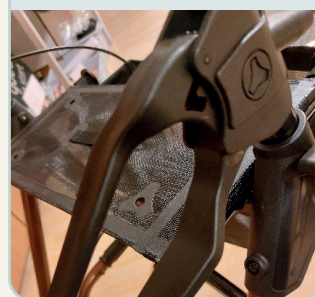

stap 5a

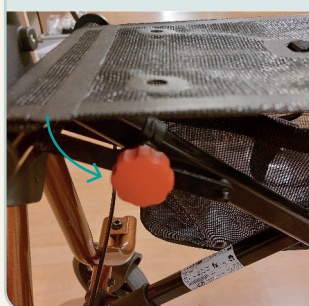

stap 5b

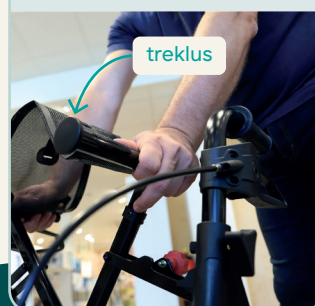

tips bij gebruik

- Schuif de loophulp niet te ver vooruit. Hou de loophulp dichtbij je lichaam voor een goede ondersteuning.
- Hou je voeten tussen de achterste wielen.
- Hindernissen nemen doe je door met de punt van je schoen op de trapdop of stoephulp te duwen. De voorste wielen worden opgetild zodat je hindernissen makkelijk kan nemen.
- Gebruik je remmen om de stoep op en af te rijden.
- Verwijder obstakels zoals tapijten als je de loophulp binnenshuis gebruikt.
- Wil je vanuit je stoel opstaan? Plaats de loophulp dan dicht bij je stoel en zorg ervoor dat de parkeerrem op staat.



tip

Heb je langere tijd een loophulpmiddel nodig? Informeer zeker of het in dat geval niet voordeliger of praktischer is om een loophulp aan te kopen in plaats van te ontfemen.

wat als het niet zo goed lukt?

Informeel bij de uitleendienst naar een loophulp met twee wielen als je moeite hebt om het tempo van de loophulp te bepalen of als je de remhendels niet kan gebruiken.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afpraak
☎ 03 205 69 29

🗣️ Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.