

loophulp vast

Bedankt om deze loophulp te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.



wat huur je bij Goed?

loophulp vast

gebruik van de loophulp

- 1 Om de loophulp open te vouwen druk je op de knop aan de bovenzijde van de loophulp. Plooi het handvat naar buiten.
- 2 Stel de loophulp in op de juiste hoogte door het verstelsysteem aan de onderkant van de poten in te drukken, en de poot in of uit te schuiven.
 - Sta mooi rechtop met je handen los langs je lichaam tussen de loophulp.
 - Verstel de loophulp zo dat het handvat juist ter hoogte van je pols komt. Zo ontstaat tijdens het gebruik van het hulpmiddel een lichte buiging in je elleboog. Dat is het meest comfortabel.
- 3 Plaats de loophulp vooruit en stap zelf naar voor.

stap 1



stap 2



tips bij gebruik

- Gebruik de loophulp als hulp om van zit tot stand te komen.
- Plaats de achterkant van de loophulp net voorbij je knieën.
- Duw je op aan de armleuning van de stoel. Trek je niet recht aan de loophulp zelf, want dan kan die kantelen.
- Draai met kleine stapjes rond indien je wil draaien met de loophulp.



tip

Heb je langere tijd een loophulpmiddel nodig? Informeer zeker of het in dat geval niet voordeliger of praktischer is om een loophulp aan te kopen in plaats van te ontlenen.

onderhoud

Controleer regelmatig of je doppen nog in goede staat zijn. Neem contact met ons op indien dit niet het geval is. Dan vervangen we je doppen of ruilen we je loophulp om.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afpraak
☎ 03 205 69 29

💡 Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.