

tips & tricks

praktische tips voor gebruik

- Heb je een kwetsbare vloer? Let op voor beschadigingen bij “montage/stap 1”.
- Zet de bedbodem altijd volledig vlak wanneer je iemand verzorgt in bed.
- Zet het bed altijd op minstens 2 remmen vast.
- Laat geen tweede persoon op het bed zitten als het bed niet volledig vlak is.
- Draai de wielen altijd onder het bed zodat je er niet tegen kan stoten.
- Hang de handbediening op aan de optrekhelp of binnen handbereik van de gebruiker.
- Zet het bed niet vlak onder de vensterbank.

wat te doen bij problemen

Kijk zeer goed de volgende zaken na:

- Zit de stekker nog diep genoeg in het stopcontact?
- Staat er spanning op het stopcontact? Is de stop in je meterkast afgesprongen?
- Zitten de fiches in de verdeeldoos onder het bed nog diep genoeg in hun aansluitingen?
- Zitten er draden gekneld? Of zijn er draden beschadigd? Zo ja, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de uitleendienst.

toch nog een probleem of vraag?

Bel naar het nummer 03 205 69 29. Je vindt dit nummer ook op de sticker op het bed.

hier al aan gedacht?

meer comfort

- ergonomische matras
- ergonomisch hoofdkussen
- antidecubitus wisseldrukmatras
- all-in-1 dekbed



gemakkelijker verzorgen

- glijdlaken
- matrasbeschermer
- bedpan
- vochtige washandjes (wassen zonder water)



Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is altijd open

Bestel en reserveer 24/7 op
www.goed.be/webshop.
Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak kennis met onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum
Kom langs voor een **gratis hoortest**.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum
of **03 205 69 20**. Je kan ook een afspraak maken voor een **videoconsultatie**.

meer info op www.goed.be

montage en gebruikerstips

elektrisch hoog-laagbed Vermeiren 2030

Bedankt om via Goed een hoog-laagbed te ontlenen. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het bed op een correcte manier te monteren en te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen hebt.



goed
samen met

bedienen voethoogte



Omhoog: Trek het handvat naar boven en breng het voeteneinde tot op de gewenste hoogte.

Omlaag: Trek het handvat omlaag tot het niet meer verder kan en laat het dan zakken.

bedienen motoren

Het gehele bed omhoog of omlaag verstellen.



Gebruik steeds de gele knop om het bed terug in zijn normale positie te krijgen.




Knieën omhoog brengen (laten knikken).

Hoofdeinde schuin omhoog oprichten.



Zet het hoofdeinde hoger dan het voeteneinde.

montage bedbodem

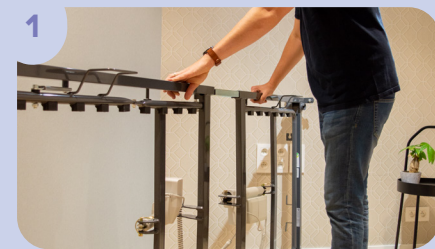


Plaats de beide delen van de bedbodem op hun kant. Schuif beide helften in elkaar.



Draai de 2 zwarte draaiknoppen links en rechts stevig vast.



Leg de bedbodem op de grond met de motoren naar onderen.

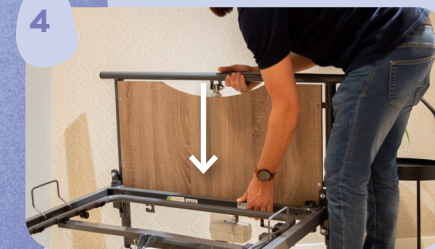

Plaats het hoofdstuk voor de voorkant van het bed. Laat de koppelpennen van de bedbodem in de gleuven glijden.



Het hoofdstuk zet zichzelf vast in de sleuf.



Plaats het achterstuk aan het voeteneinde van het bed. Laat de koppelpennen van de bedbodem in de gleuven glijden.



Maak alle transportklemmen los voordat je het bed gebruikt.



Er zijn drie transportklemmen op het bed: één aan het hoofdeinde, twee aan de voetkant. Trek elke klem naar achteren.



Draai hem 180° om naar beneden. Doe dit voor alle 3 de klemmen.



Nu kan je het deksel helemaal optrekken.



Op de clipjes rond de stekkers staat een getal.
1 → motor hoofdeinde
2 → sponde aan hoofdkant
3 → motor knieknik
4 → sponde aan voetkant



Bevestig de stekker voor sponde hoofdkant in aansluiting 2.



Bevestig de stekker van de knieknik in aansluiting 3, en de stekker van de sponde aan de voetkant in aansluiting 4.



Steek een schroevendraaier in de rechtersleuf. Beweeg terwijl je duwt de schroevendraaier naar beneden. Het deksel komt een beetje open.



Duw met een schroevendraaier in de linkersleuf. Beweeg terwijl je duwt de schroevendraaier naar beneden. Het deksel komt nu verder open.



Voor elke stekker is er een aansluiting voorzien in het bakje.



Duw stekker 2 in aansluitingsopening 2.



Sluit het deksel met een lichte klik. (Als de kabels mooi in de geleiders zitten, gaat dit moeiteloos.)




Steek nu pas de stekker in het stopcontact. Zorg dat alle kabels ook onder het bed mooi vrij hangen en niet gekneld of in de knoop liggen.

montage optrekhelp



Steek de onderkant van de optrekhelp in het linker- of rechtergat aan het hoofdeinde. Kies de kant langs waar de gebruiker het bed in-/uitkomt.

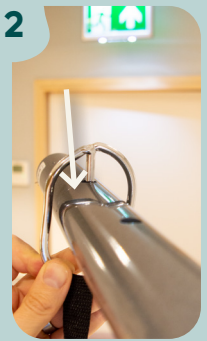

Schuif het zilveren oog van de triangel over de stang. Steek de pin in het gewenste gat. De plaats kan je zelf instellen. Ook de lengte is instelbaar.

montage zijsponden



Schuif de zwarte haken met de draaidoppen naar beneden over de balk met de rechterkant aan het hoofdeinde. De haken mogen de hoofdsteun of knieknik niet afknellen wanneer deze omhoog worden gezet.



Zorg dat de schuine zijde aan het voeteinde van het bed zit. Draai beide draaidoppen vast.

bediening zijsponden



Trek de zwarte dop naar beneden en duw tegelijkertijd het hek schuin omlaag of omhoog.