

Aanbrengen van een Conveen Optima condoomkatheter



1. Vóór het aanbrengen: reinig de penis met water en een neutrale, niet vette zeep. Gebruik geen talk of crèmes, die kunnen er immers voor zorgen dat de Conveen Optima condoomkatheter niet goed kleeft. Indien de Conveen Optima condoomkatheter door een partner of verzorger wordt aangebracht, kan deze handschoenen dragen.



2. Droog de penis nadien goed af. Knip indien nodig schaamhaartjes wat bij. Scheren kan kleine wondjes veroorzaken en is dus niet aangeraden.



3. Indien u de juiste maat nog niet kent, neem dan de maat in het midden van de penis met behulp van de Conveen Guide. Zowel de maat nemen als het aanbrengen, gebeurt met de penis in rusttoestand (dus geen erectie). Als de penis de neiging heeft van in de buik te trekken – ga dan rechtstaan of liggen bij het aanbrengen en gebruik een Conveen Optima condoomkatheter met een verkorte schacht. Indien u twijfelt tussen twee maten, probeert u eerst de kleinste maat.



4. Zorg ervoor dat de voorhuid over de eikel zit. Plaats de Conveen Optima condoomkatheter op de penis en houd hem met een hand vast. Laat ± 1 cm ruimte tussen de eikel en het anti-kniksysteem.



5. Trek met uw andere hand rustig de strip naar u toe, zodat de Conveen Optima condoomkatheter gelijkmatig afrolt. Als u de correcte maat heeft gebruikt, zijn er na het afrollen van de Conveen Optima condoomkatheter geen ribbels of plooien. Druk kort en zachtjes op de Conveen Optima condoomkatheter zodat deze goed kleeft op de huid. Een Conveen Optima condoomkatheter kan maximaal 24u gebruikt worden en kan niet hergebruikt worden.



6. Indien u toch nog extra kleefkracht nodig heeft, kunt u Conveen Prep gebruiken. Breng de Conveen Prep aan op de penis, wacht even tot de Conveen Prep laag gedroogd is en breng dan de condoomkatheter aan. Indien u een gevoelige of droge huid heeft die u extra wil beschermen, kunt u de Brava Skin Barrier gebruiken.



7. De slang van de urinebeenzak wordt met een schaar ingekort om de gewenste lengte te verkrijgen. Zo vermijdt u knikvorming van de slang en terugvloeien van de urine naar de Conveen Optima condoomkatheter en het loskomen van de condoomkatheter. Steek de connector stevig in het niet-geribbelde gedeelte van de slang van de urinebeenzak.



8. Bevestig een urineopvangzak (been- of nachtzak) aan de Conveen Optima condoomkatheter door de urinezakconnector in de tip van de Conveen Optima condoomkatheter te duwen. Het uiteinde van de Conveen Optima heeft een “sure grip” (vaste greep) en een aansluiting op de tip zodanig dat u de tip van de Conveen Optima condoomkatheter gemakkelijker kunt vasthouden bij het bevestigen aan de urinezak. Duw het verbindingstukje van de urineopvangzak ver genoeg in de tip van de condoomkatheter om een goede verbinding te verzekeren en zo lekkage te voorkomen.



9. De 2 knopen van het breedste beenriempje worden bovenaan in de 2 openingen van de beenzak aangebracht. Op dezelfde manier wordt het smalle beenriempje onderaan de beenzak aangebracht. De lengte van de beenriempjes wordt met een schaar aangepast aan de omtrek van het been. De eventuele nachtzak wordt door middel van een bedhaak aan de zijkant van het bed gehecht (ter hoogte van de onderbenen).



10. Voor extra veiligheid en om een goede afloop van de urine te garanderen, kunt u de Conveen G-strap gebruiken. Bevestig de G-strap op uw bovenbeen met het Coloplast etiket naar de buitenkant en plaats de tube op het rubberen bandje. Wikkel het bandje rond en onder de tube tot de katheter vastzit en trek het vrije uiteinde door de gleuf tot de tube goed vastzit. Druk de velcrobevestiging vast op de Conveen G-strap (Opgelet - de tube mag niet té strak bevestigd worden om de urinestroom niet te belemmeren).



11. Om te verwijderen: koppel de urinezak los en rol de Conveen Optima condoomkatheter voorzichtig terug. Indien nodig kan lauw water gebruikt worden om dit te vergemakkelijken of u kunt gebruik maken van de Brava Remover Spray. Spuit de Brava Remover Spray tussen de Conveen Optima en de huid, even wachten en de condoomkatheter komt los.